

MASQUE BARRIERE UNSI REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone • mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

De quoi est constitué le masque Si-Mask™ ?

Le masque Si-Mask™ est constitué d'un demi-masque en silicone ajustable au niveau du nez. Deux kits de brides, en silicone également, permettent à l'utilisateur de mettre en place le masque suivant ses préférences (tour d'oreille ou tour de tête). Une rondelle bloque-filtre, également en silicone, permet de maintenir le filtre pendant l'utilisation. 20 filtres sont livrés avec l'ensemble des pièces en silicone, qui seront ensuite à réapprovisionner dans le commerce par l'utilisateur.

Que contient le kit Si-Mask™ ?

Le kit de départ contient le masque en silicone, une bague en silicone servant de support de filtre, un jeu de sangles grises pour mise en place en tour de tête, un jeu de sangles bleues pour mise en place derrière les oreilles, un sachet de 20 filtres, une notice d'utilisation, le tout livré dans un sachet PE thermo-soudé, réutilisable avec fermeture zip.

Quel est le poids du Si-Mask™ ?

Le masque Si-Mask™, entièrement équipé, pèse environ 100 gr +/- 10 gr en fonction des sangles utilisées (tour de tête ou derrière les oreilles).

Quelles sont les dimensions du Si-Mask™ ?

Le masque Si-Mask™ est conçu pour répondre aux préconisations décrites dans la spécification AFNOR S76-001 du 27/03/2020, résumé par le schéma ci-dessous :





			
Distance bigoniale 132.5 – 144.5 mm	Longueur menton-sellion 123 – 135 mm	Distance interpupillaire 65 – 71 mm	Arc bitragus-gnathion 295 – 315 mm

Figure 2 – Schéma des dimensions à prendre en compte

MASQUE BARRIERE UNS1 REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone
mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

La souplesse du silicone, et la barrette nasale ajustable permettent un ajustement automatique au visage ; il est proposé avec 2 montages possibles, sangles tour de tête ou derrière les oreilles, pour optimiser le confort de chacun.

Attention, le port de barbe, certains traits de morphologie ainsi que la présence de bijoux (de type piercing par exemple) pourraient réduire l'efficacité du masque.

Quel type de protection offre Si-Mask™?

Si-Mask™ a été testé en filtration et en résistance respiratoire par un laboratoire indépendant; le filtre proposé (coton, microfibrilles polyester, polyester), offre un taux de filtration aux particules de 3 µm de plus de 98% (critère UNS1 : >90%) et une respirabilité de 13,2 Pa/cm² (critère UNS1 : < 60 Pa/cm²).

Comment se situe Si-Mask™ en termes de classification ?

Les exigences de la note d'information interministérielle du 29 Mars 2020 spécifient uniquement la capacité de filtration (90% ou 70%) des particules de 3µm émises par le porteur et classe les masques tissus suivant 2 catégories : UNS1 et UNS2.

Les performances de Si-Mask™ le classent sous la catégorie UNS1.

Où trouver les recharges de filtres Si-Mask™ ?

Le filtre Si-Mask est un disque démaquillant de la marque CIEN distribué chez LIDL (moins de 1 € le paquet de 140 pièces), composé à 60% de coton, 20% de microfibrilles polyester et 20% de Polyester, une solution très économique.

Nous travaillons d'ores et déjà sur un média filtrant encore plus performant, utilisable sur le masque existant, des tests sont en cours ; tous les acquéreurs d'un ou plusieurs Si-Mask™ seront tenus informés de nos avancées et des résultats obtenus.

MASQUE BARRIERE UNSI REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone
mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

Quel est le temps d'utilisation préconisé de Si-Mask™ ?

Un filtre a un temps d'utilisation de 4h maximum. Au-delà de ce temps, il convient de nettoyer le masque et de remettre un filtre neuf.

Comment nettoyer Si-Mask™ ?

3 méthodes de nettoyage sont définies dans la notice d'utilisation du produit :

- Nettoyage en pulvérisant de l'alcool isopropylique ;
- Nettoyage au gel hydro-alcoolique ;
- Nettoyage à l'eau bouillante.

Puis-je stériliser Si-Mask™ au micro onde ?

Surtout pas, la présence d'une pièce métallique au niveau de la barrette nasale ne permet pas de stérilisation au micro-onde.

Peut-on utiliser un autre filtre ?

Le filtre défini et testé permet une filtration de 98% de particules de 3µm (critère UNS 1). Il est de la responsabilité de l'utilisateur de changer de type de filtre.

Quand utiliser Si-Mask™ ?

Comme tous les autres masques, il est conseillé de porter le masque en dehors des zones où l'utilisateur est seul ou dans son espace de confinement (maison, voiture...). N'effectuez pas d'activité physique intense avec Si-Mask™.

MASQUE BARRIERE UNSI
REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



silicone
Si-mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

Où acheter Si-Mask™ ?

Vous pouvez acheter Si-Mask™ sur la boutique en ligne www.si-line.eu Pour les professionnels, ou pour une commande supérieure à 10 pièces, adressez votre demande à si-mask@sterne-elastomere.com.

Un composant de mon masque est cassé ou défectueux. Peut-on acheter les pièces de rechange pour Si-Mask™ ?

Munissez-vous de votre notice d'utilisation. A l'aide de la partie composition, identifiez le ou les composants défectueux et adressez votre demande à si-mask@sterne-elastomere.com.

Où sont fabriqués les masques Si-Mask™ ?

Le masque Si-Mask™ est entièrement, conçu, fabriqué, confectionné et emballé en France, à Cavailon.

Les masques Si-Mask™ sont en silicone, qu'en est-il du confort de l'utilisateur ?

Le Si-Mask™ est conçu pour le confort de l'utilisateur. En effet, en plus de la souplesse du silicone utilisé, le masque ne comporte aucune arête vive et son touché « peau de pêche » permet un confort optimal. De plus, tous les silicones utilisés pour la fabrication de Si-Mask™ sont de grade médical, pouvant ainsi être utilisés pour le contact cutané sans risques pour l'utilisateur.

Qui peut utiliser Si-Mask™ ?

La conception du masque, couplée à la souplesse du silicone et la barrette nasale, s'adapte à la majorité des morphologies et permet l'utilisation du masque sur petite ou grosse tête.

MASQUE BARRIERE UNSI
REUTILISABLE A FILTRE JETABLE



Sisilicone
mask

MADE IN
FRANCE

FAQ - Questions Fréquentes sur l'Utilisation du Si-Mask™

Ne pas utiliser Si-Mask™ sur des enfants de moins de 12 ans.

J'ai une question ou une demande particulière. A qui puis-je m'adresser ?

N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante si-mask@sterne-elastomere.com.